



リカバリーケア リヴァイブ  
M2 フルレッグパック ¥150,000(税込 ¥165,000)

〈対応サイズ〉

品番	サイズ	股下	最大幅(太もも周り)	身長
M2RG200SM-JP	S	65-81cm	71cm	150-175cm
M2RG200MD-JP	M	81-86cm	74cm	175-195cm
M2RG200LG-JP	L	86-96cm	74cm	195cm以上

●セット内容:コンソール / フルレッグブーツ × 2  
/ AC電源アダプタ / フロンングプラグ  
※セットのフルレッグブーツは、S/M/Lのサイズ展開がございます。  
※上記サイズはあくまで目安となります。

医療機器認証番号	304AGBZI00002000
クラス分類	家庭用エアマッサージ器(クラスII)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	36W
リチウムイオン充電電池	11.1V/3800mAh(42.18Wh)
マッサージ持続時間	10分/15分/20分/25分/30分
空気圧範囲	20~100mHg



コアショーツ

RG600-JP ¥110,000(税込 ¥121,000)

〈対応サイズ〉

大腿部	股下	ウエスト	股上
~68cm	25cm	~133cm	38cm(前方)/53cm(後方)

●セット内容:コアショーツ × 1  
※コンソール本体は含まれていません。



フルレッグブーツ(ペア) S:RG200SM-JP  
M:RG200MD-JP  
¥80,000(税込 ¥88,000) L:RG200LG-JP

●セット内容:フルレッグ × 2 ●サイズ:S / M / L  
※コンソール本体は含まれていません。



カフブーツ(ペア)

RG100-JP ¥60,000(税込 ¥66,000)

●セット内容:カフブーツ × 2  
●本体サイズ:72×32×5cm(膝下:約47cm)  
※コンソール本体は含まれていません。



アームスリーブ(片腕)

RG500-JP ¥40,000(税込 ¥44,000)

●セット内容:アームスリーブ × 1  
●本体サイズ:102×39×5cm(袖丈:約75cm)  
※着用ガーメントを使用する場合は片腕のみとなっています。  
※コンソール本体は含まれていません。



コンソール本体

M2-JP ¥90,000(税込 ¥99,000)

●重量:1kg ●サイズ:W21×D20×H9cm



ミュラーマルチバックパック

16200 ¥25,000(税込 ¥27,500)

●重量:975g ●サイズ:W31×D22×H52cm  
●素材:ポリエステル / ポリ塩化ビニル / ポリウレタン

〈リカバリーケア リヴァイブ安全上のご注意〉

警告:●本製品は健康状態の良い方への使用を想定しています。深部静脈血栓症、静脈炎と診断された人、医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)への使用はしないでください。●妊娠初期の不安定期、または出産直後の人は、使用前に担当医に相談してください。●妊娠中または妊娠している可能性がある人の臀部着用ガーメントは使用しないでください。●ペースメーカー、植込み型除細動装置などの電磁障害の影響の受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用されている人には使用しないでください。

注意:医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

●ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●妊娠初期の不安定期、または出産直後の人 ●安静を必要とする人 ●体温38°C以上(有熱期)の人(例1:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある人 例2:衰弱している人) ●骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人(背中を治療する機器に限る) ●温度感覚喪失が認められる人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●その他、医療機関で治療中の人 ●マッサージ中又はマッサージ後に、痛みや不快感がある場合又は挫傷や刺激が生じた場合は、使用を中止して医師に相談してください。また、しばらく使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。



ミュラーージャパン株式会社 輸入総発売元

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル

TEL: 045-651-7800 FAX: 045-651-7828

www.muellerjapan.com

お問い合わせ先:sportcare@muellerjapan.com

Copyright ©2024 Mueller Japan Inc. All Rights Reserved.

※表示価格はメーカー希望標準小売価格です。

※製品の仕様・外観・梱包仕様は改良などの理由により、予告なく変更する場合があります。



REVIVE  
2024.11

販売店



REVIVE™

リカバリーケア リヴァイブ

MUELLER RECOVERYCARE

# REVIVE

家庭用エアマッサージ器 [クラスII]

コリの解消

血行促進


疲労回復



心臓からもっとも遠い筋肉部位で、下半身の血液循環のなかでも静脈血を心臓に送るポンプ作用が強いのがふくらはぎの筋肉で「第二の心臓」とも呼ばれています。このため、全身の血液を効率よく循環させるためにはふくらはぎを動かすことが重要です。

リヴァイブは加圧と除圧を繰り返すことで血行を促進します。

### ふくらはぎの「筋肉ポンプ作用」

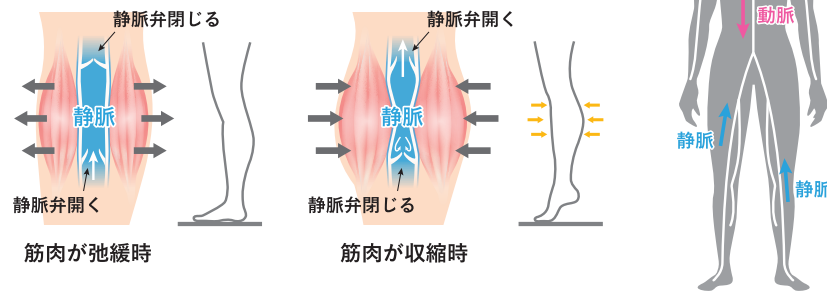

## REVIVE AMBASSADOR



谷口 彰悟 (サッカー日本代表)

普段からのトレーニングやコンディションの維持にも全力で取り組むことを日々意識していますが、「リヴァイブ」の回復効果、持ち運びの手軽さ、メンテナンスの容易さにとても魅力を感じています。また自宅でのセルフケアだけではなく、アウェイでの滞在先にも持参し、多い時は1日に複数回使用するほど、コンディションを整える上で欠かせないマストアイテムだと感じています。



阿部 勝彦 ハイパフォーマンスディレクター (東京ヤクルトスワローズ)

プロ野球は1週間に6試合 (年間143試合+ポストシーズン) をこなす環境下において安定したパフォーマンスを発揮することが求められます。ちょっとした体の「ギア」のズレが気づかない「力」の差になり、その積み重ねが「大きな差」になってしまいます。1日1日をリセットして毎日同じ状態で試合に臨み、継続して安定した結果を残すためにも日々のリカバリー・身体の調整が非常に重要なスポーツであり、「リヴァイブ」はそれを実現する重要なツールとなっております。

多くのプロスポーツチームにREVIVEを含め、ミュラージャパンのスポーツ医学製品を愛用頂いております。

サッカー



ラグビー




バスケットボール



### 循環をサポートする高速サイクル

空気力をつま先から太ももへ向かって徐々に絞りに絞りに包み込み、一気にすべての空気を抜くことで血液循環の促進をサポートします。

- ①4つに分かれたラップのつま先から太ももへ絞りに絞りに包み込み、一気にすべての空気を抜くことで血液循環の促進をサポートします。
- ②太ももまですべてのラップが加圧された状態でホールド (ホールド時間は0秒/5秒/10秒で設定可能)
- ③ホールド後すべての空気を除圧することで血流を促進

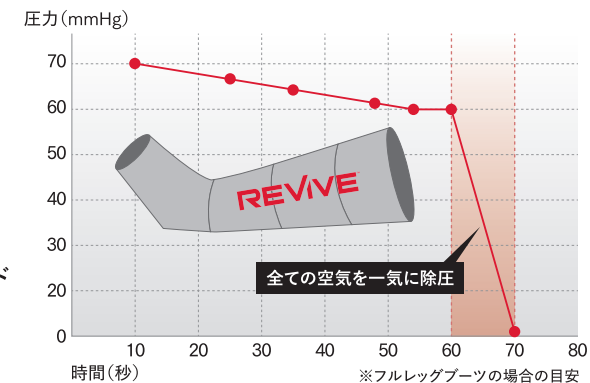

### 運動前後で使える適切な圧力設定

ケアする方の状態に合わせて20-100mmHgの範囲で圧力調整が可能のため、毎日のリカバリーだけでなく、運動前のウォーミングアップやリハビリなど、様々なシーンで利用が可能です。


(推奨設定)

圧力	時間	ホールドタイム
リカバリー (男性) 80-90mmHg	30分間	5-10秒
リカバリー (女性) 60-70mmHg	30分間	5-10秒
ウォームアップ 40-50mmHg	15分間	なし
リハビリテーション 20-50mmHg	15分間	なし

### 効果的なオーバーラップ構造

特許取得のオーバーラップ構造で足首、ひざ関節をけん引することにより、運動後の疲労回復を効果的に促進します。

脚全体をムラなくケアするオーバーラップ構造

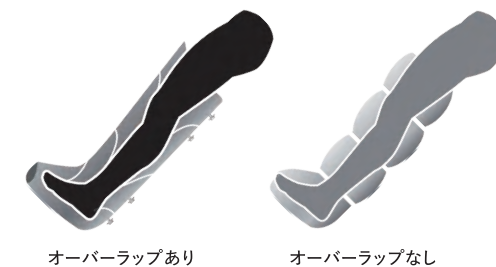

### どこでも使えるコンパクト設計とロングバッテリー

最長約8時間駆動可能なバッテリーを搭載し、軽量・コンパクト・コードレス設計で外出先や移動中など、電源のない場所でも使用可能です。また飛行機内にも持ち込み可能なリチウムイオンバッテリーを採用することで、遠征先・旅先でも活用頂けます。



### 豊富なガーメントで脚以外の部位にも対応可能

スタンダードなフルレグタイプに加えて、カフ (膝下用)・コアショーツ (臀部・腰・鼠径部用)・アーム (腕用) が加わりました。本体は共通仕様のためガーメントの買い足しで様々な部位に対応可能となりました。



フルレグ



カフ (膝下用)



コアショーツ (臀部・腰・鼠径部用)



アーム (腕用)